

# MODO DE USO METALU B-2 / PK

1. **El responsable o dirección del centro** debe de conocer el funcionamiento del elevador, para ello basta con que realice unas veces lo indicado en el punto 4.

2. El elevador **solo lo debe utilizar** el personal del centro o usuarios autorizados.

3. **Al empezar la jornada.** (Por el responsable de la piscina):

Colocar el asiento en su alojamiento comprobando que todo esta correcto y llega presión de agua al elevador.

4. **Al iniciar el baño.** (Por el usuario):

- Colóquese en el asiento.
- Compruebe que el radio de acción esta libre.



- Inicie el descenso utilizando el mando de la válvula, controlando la velocidad con la apertura de esta.
- Una vez en el agua, suba el asiento para que no moleste en la natación o lo pueda utilizar otro usuario.
- Para salir de la piscina invierta el proceso.

5. **Al terminar la jornada.** (Por el responsable de la piscina):

- Limpie (riegue) el elevador con agua de la red, según muestra el gráfico.



- Guarde el asiento.

Ante cualquier duda o incidencia contacten con fábrica:

+34 95 590 77 84

info@ascensoracuatico.com