


11. Uso del elevador.

Para hacer uso del ascensor acuático seguir con los siguientes puntos:

1. **Desbloquear el paro de emergencia** del sistema de control (mecanismo eléctrico de 24V).

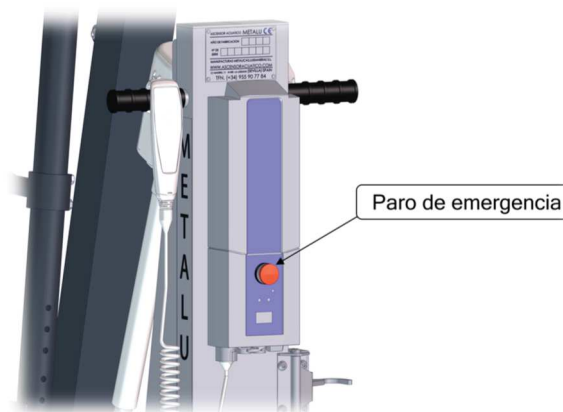

2. Sentarse en la silla y situar los pies en el reposapiés.
3. Servirse del mando de manipulación del elevador situado a su izquierda.
4. Pulse el botón de bajada del mando para que la máquina realice el movimiento de acceso a la piscina.

IMPORTANTE: *deberá verificarse que no hay nadadores en el agua que quedaran bajo la silla del Ascensor Acuático en cualquier posición de su recorrido, debiéndose mantener vigilado el área de deposición para evitar que nadie sea golpeado por accidente.*

5. Devolver la silla a la posición de inicio pulsando el botón de subida del mando de manipulación. Así el elevador quedará recogido fuera de la piscina, dispuesto para otro usuario. De esta manera se evitará que la silla y sus accesorios supongan un obstáculo para los nadadores.

Para salir de la piscina realizar los pasos, del 5 al 1, en el orden inverso y prestando atención a las mismas precauciones y advertencias.

Movimiento del elevador:

- El movimiento del Ascensor Acuático se realiza en un **único movimiento** que provoca la entrada o salida del usuario en el agua.

